

Схема сумісності хірургічної техніки

Головки стегнової кістки компанії Mathys можна комбінувати з різноманітними схваленими ніжками та чашками. Цей документ містить повний перелік сумісних систем для імплантації. Ця схема сумісності охоплює наведені нижче типи головок стегнової кістки.

Металеві головки стегнової кістки

CoCrMo
SS



Керамічні головки стегнової кістки

ceramys
symarec
Bionit2



Ревізійні головки стегнової кістки

ceramys




Комбінації із системами компанії Mathys Ltd Bettlach

Наведені нижче комбінації виробів компанії Mathys Ltd Bettlach були протестовані та схвалені:



Комбінації із системами компанії Mathys Ltd Bettlach

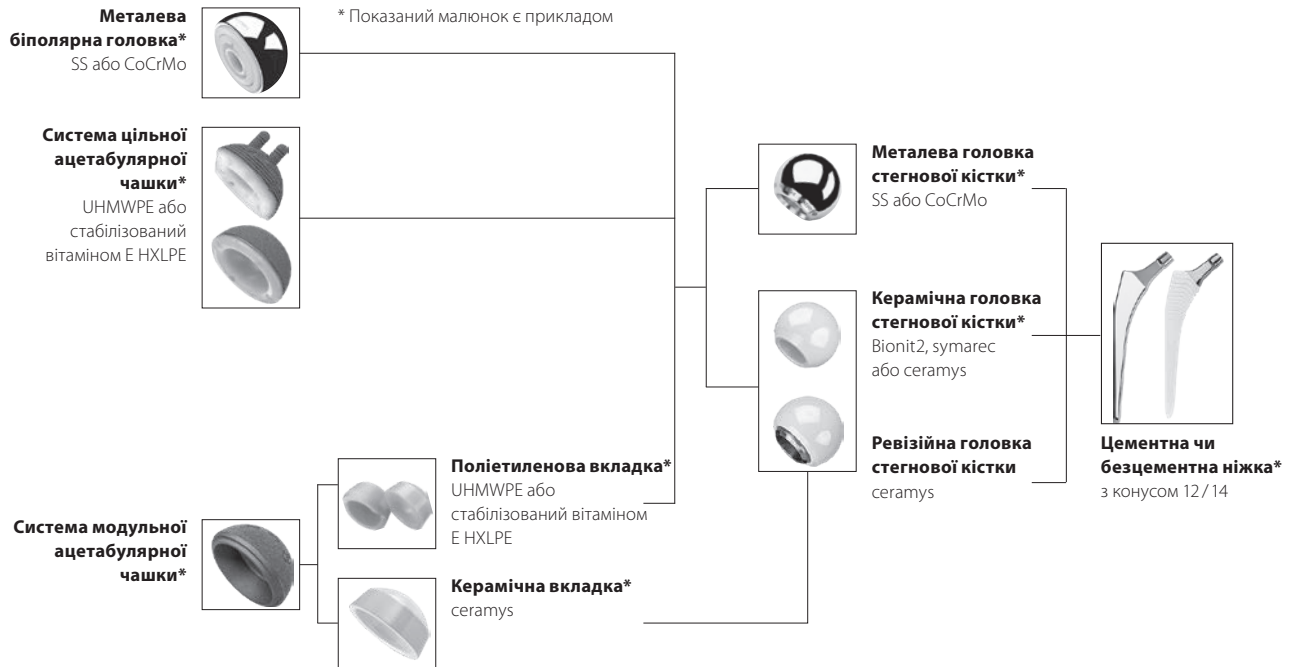

Обмеження

- Головки стегнової кістки у комбінації з нішкою CVH:
 - Ніжки CVH розміру 0 можна комбінувати лише з головками стегнової кістки з довжиною шийки не більше ніж L.
 - Ніжки CVH розміру 1 – 12 можна комбінувати лише з головками стегнової кістки з довжиною шийки не більше ніж XL.
- Головки стегнової кістки у комбінації з модульною ревізійною нішкою:
 - Модульні шийки модульної ревізійної ніжки можна комбінувати лише з головками стегнової кістки з довжиною шийки S, M та L.
- Металеві головки у комбінації з керамічними вкладками.

Компанія Mathys Ltd Bettlach суворо застерігає не комбінувати вироби компанії з системами для імплантації інших виробників, за винятком комбінацій, що були протестовані та схвалені, і які перелічені на схемі сумісності хірургічної техніки. Компанія Mathys Ltd Bettlach несе відповідальність виключно у випадку, якщо імплантат Mathys було використано саме для того, для чого він був розроблений та виготовлений.

Комбінації із системами компанії PETER BREHM GmbH

Комбінації певних виробів компанії Mathys Ltd Bettlach і компанії PETER BREHM GmbH були протестовані, та було доведено їхню сумісність. У контексті хірургічної техніки для перелічених нижче виробів компанії PETER BREHM, наступні комбінації з головками компанії Mathys схвалені до застосування.

Головка стегнової кістки, CoCrMo

Mathys Головка стегнової кістки, CoCrMo Артикул №	Розмір	PETER BREHM MRP-TITAN
52.34.0125	22,2 S	X
52.34.0126	22,2 M	✓
52.34.0127	22,2 L	✓
2.30.010	28 S	✓
2.30.011	28 M	✓
2.30.012	28 L	✓
2.30.013	28 XL	X
2.30.014	28 XXL	X
2.30.020	32 S	✓
2.30.021	32 M	✓
2.30.022	32 L	✓
2.30.023	32 XL	X
2.30.024	32 XXL	X
52.34.0686	36 S	X
52.34.0687	36 M	X
52.34.0688	36 L	X
52.34.0689	36 XL	X
52.34.0690	36 XXL	X

Головка стегнової кістки, ceramys

Mathys Головка стегнової кістки, ceramys Артикул №	Розмір	PETER BREHM MRP-TITAN
–	22,2 S	–
–	22,2 M	–
–	22,2 L	–
54.47.0010	28 S	✓
54.47.0011	28 M	✓
54.47.0012	28 L	✓
–	28 XL	–
–	28 XXL	–
54.47.0110	32 S	✓
54.47.0111	32 M	✓
54.47.0112	32 L	✓
54.47.0113	32 XL	X
–	32 XXL	–
54.47.0210	36 S	✓
54.47.0211	36 M	✓
54.47.0212	36 L	✓
54.47.0213	36 XL	X
–	36 XXL	–

Головка стегнової кістки, сумарес і ревізійна головка, ceramys

Mathys Головка стегнової кістки сумарес Артикул №	Mathys Ревізійна головка ceramys Артикул №	Розмір	PETER BREHM MRP-TITAN
54.48.0010	54.47.2010	28 S	✓
54.48.0011	54.47.2020	28 M	✓
54.48.0012	54.47.2030	28 L	✓
–	54.47.2040	28 XL	X
54.48.0110	54.47.2110	32 S	✓
54.48.0111	54.47.2120	32 M	✓
54.48.0112	54.47.2130	32 L	✓
54.48.0113	54.47.2140	32 XL	X
54.48.0210	54.47.2210	36 S	✓
54.48.0211	54.47.2220	36 M	✓
54.48.0212	54.47.2230	36 L	✓
54.48.0213	54.47.2240	36 XL	X

Символи



✓ Комбінацію виробів оприлюднено компаніями Mathys Ltd Bettlach і PETER BREHM GmbH.

X Комбінацію виробів не оприлюднено компаніями Mathys Ltd Bettlach і PETER BREHM GmbH.