

Kompatibilitätstabelle für Operationstechnik

Mathys Femur-Hüftköpfe können mit einer Vielzahl von freigegebenen Schäften und Pfannen kombiniert werden. Dieses Dokument enthält eine vollständige Liste der kompatiblen Implantatsysteme. Die folgenden Arten von Hüftköpfen werden von dieser Kompatibilitätstabelle abgedeckt.

Metallene Hüftköpfe

CoCrMo
SS



Keramische Hüftköpfe

ceramys
symarec
Bionit2




Revisions-Hüftköpfe

ceramys




Kombination mit Systemen von Mathys AG Bettlach

Die folgenden Kombinationen von Produkten der Mathys AG Bettlach sind geprüft und freigegeben:

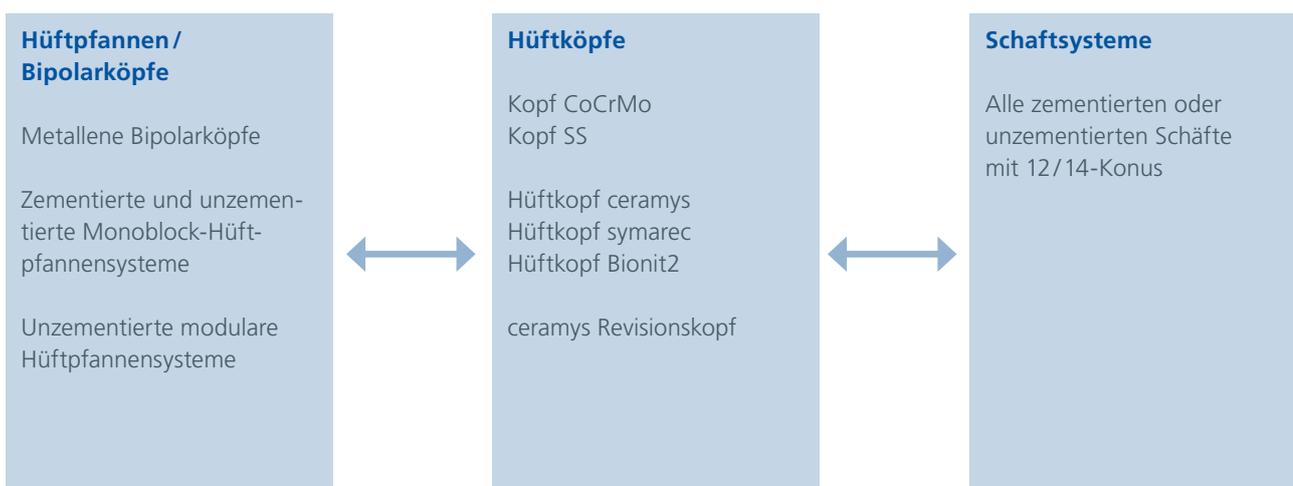

Kombination mit Systemen von Mathys AG Bettlach

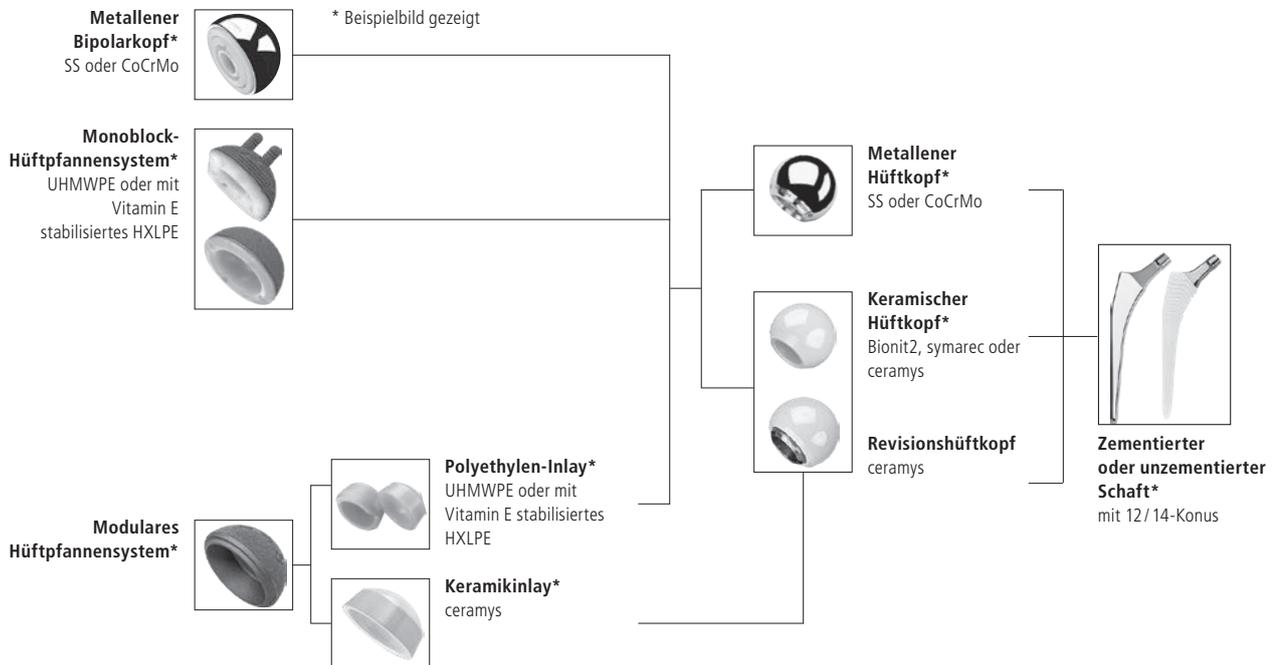

Einschränkungen

- Femurköpfe in Kombination mit dem CBH-Schaft:
 - Der CBH-Schaft der Grösse 0 kann nur mit Femurköpfen bis zur Halslänge L kombiniert werden.
 - Die CBH-Schäfte der Grössen 1–12 können nur mit Femurköpfen bis zur Halslänge XL kombiniert werden.
- Femurköpfe in Kombination mit dem Modularen Revisionschaft:
 - Modulare Hälse des Modularen Revisionschafts dürfen nur mit Femurköpfen der Halslängengrössen S, M und L kombiniert werden.
- Metallköpfe in Kombination mit Keramikinlays.

Mathys AG Bettlach empfiehlt dringend, ihre Produkte nicht mit Implantatsystemen von anderen Herstellern zu kombinieren, ausgenommen davon sind Kombinationen, die geprüft und genehmigt wurden und in der Kompatibilitätstabelle für Operationstechniken aufgeführt sind. Mathys AG Bettlach übernimmt keine Verantwortung, es sei denn, das Mathys-Implantat ist speziell für eine solche Verwendung entworfen und hergestellt.

Kombination mit Systemen der PETER BREHM GmbH

Die Kombination bestimmter Produkte der Mathys AG Bettlach und der PETER BREHM GmbH wurde getestet und für kompatibel befunden. Im Rahmen der Operationstechniken für die unten aufgeführten PETER BREHM Produkte sind die folgenden Kombinationen mit Mathys-Köpfen freigegeben.

Hüftkopf CoCrMo

Mathys Hüftkopf CoCrMo Art. Nr.	Grösse	PETER BREHM MRP-TITAN
52.34.0125	22,2 S	X
52.34.0126	22,2 M	✓
52.34.0127	22,2 L	✓
2.30.010	28 S	✓
2.30.011	28 M	✓
2.30.012	28 L	✓
2.30.013	28 XL	X
2.30.014	28 XXL	X
2.30.020	32 S	✓
2.30.021	32 M	✓
2.30.022	32 L	✓
2.30.023	32 XL	X
2.30.024	32 XXL	X
52.34.0686	36 S	X
52.34.0687	36 M	X
52.34.0688	36 L	X
52.34.0689	36 XL	X
52.34.0690	36 XXL	X

Hüftkopf ceramys

Mathys Hüftkopf ceramys Art. Nr.	Grösse	PETER BREHM MRP-TITAN
–	22,2 S	–
–	22,2 M	–
–	22,2 L	–
54.47.0010	28 S	✓
54.47.0011	28 M	✓
54.47.0012	28 L	✓
–	28 XL	–
–	28 XXL	–
54.47.0110	32 S	✓
54.47.0111	32 M	✓
54.47.0112	32 L	✓
54.47.0113	32 XL	X
–	32 XXL	–
54.47.0210	36 S	✓
54.47.0211	36 M	✓
54.47.0212	36 L	✓
54.47.0213	36 XL	X
–	36 XXL	–

Hüftkopf symarec & ceramys Revisionskopf

Mathys Hüftkopf symarec Art. Nr.	Mathys ceramys Revisionskopf Art. Nr.	Grösse	PETER BREHM MRP-TITAN
54.48.0010	54.47.2010	28 S	✓
54.48.0011	54.47.2020	28 M	✓
54.48.0012	54.47.2030	28 L	✓
–	54.47.2040	28 XL	X
54.48.0110	54.47.2110	32 S	✓
54.48.0111	54.47.2120	32 M	✓
54.48.0112	54.47.2130	32 L	✓
54.48.0113	54.47.2140	32 XL	X
54.48.0210	54.47.2210	36 S	✓
54.48.0211	54.47.2220	36 M	✓
54.48.0212	54.47.2230	36 L	✓
54.48.0213	54.47.2240	36 XL	X

Symbole



Die Produktkombination ist von Mathys AG Bettlach und PETER BREHM GmbH freigegeben.

Die Produktkombination ist nicht von Mathys AG Bettlach und PETER BREHM GmbH freigegeben.